

Monteringsmanual på høydejusterbare nakkeputer

Før du monterer nakkeputa, kontroller at alle deler i Diagram 1/List 1 medfølger.



Diagram 1

List 1

Nr.	Navn	Spesifikasjon	Antall	Bemerk
1	Pute	ST-13	1	400x120
2	Belagt gummi hylse	Ø32x22	2	Belagt overflate er glatt og skaller ikke av
3	Nakkepute stang	Ø19x240	2	Belagt overflate er glatt og skaller ikke av, skrue på 1 ende
4	Nakkepute lås	Ø50x92	2	Låsen er med "seig" og bør være uten skrammer
5	Mekanisk fjær	Ø4x12	2	Ø 0,35 rustfri stål fjær
6	O ring lys pakningsfølger	Ø26x3.0	2	Du bør sjekke at ringen er "seig" og uten skrammer
7	Belagt knapp	40x26x8	1	Belagt overflate er glatt og skaller ikke av
8	O skive mørk	Ø18x2.65	2	
9	Belagt deksel ring	Ø50x13	2	Belagt overflate er glatt og skaller ikke av, 1 ring har knapp åpning
10	Gummi ring	Ø46x3	2	
11	Skrue mutter	Ø46x12	2	

Monteringsmanual på høydejusterbare nakkeputer



1. Sett på plass belagt gummi hylse (del 2) i hullene i nakkeputen



2. Finn frem stanga som har skråhakk. Ta på transparent silikon på skruedelen på stanga (del 3)



3. Skru forsiktig putestanga inn i putehullene. Kontroller at stanga er vinkelrett (er korrekt innskrudd)



4. Finn frem den andre stanga som er uten skråhakk, ta på silikon og skru den forsiktig inn i det andre putehullet. Sjekk at den er vinkelrett.



5. Finn frem belagt dekselring (del 9), mørk O-ring (del 8) og lys pakningsfølger (del 6)



6. Plassér mørk O-ring i sporet i midten av belagt dekselring.



7. Plassér lys O-pakningsfølger i midten, på belagt dekselring. Sørg for at rillet side vender mot mørk O-ring.



8. Ta på transparent silikon i kanten rundt lys O-paking, smør pent utover.



9. Gjenta prosessen med ringene på den andre belagte dekselringen.

Monteringsmanual på høydejusterbare nakkeputer




10. Etter at silikonen er herdet, plassér belagt dekselring oppe på hvit putelås (låsen kan ombyttes).




11. Rengjør belagt dekselring etter monteringen, sjekk at alt ser bra ut.



12. Med tapetkniv fjern utstående kant/ugjevnheter på belagt knapp (del 7). Den skal være helt glatt og jevn.

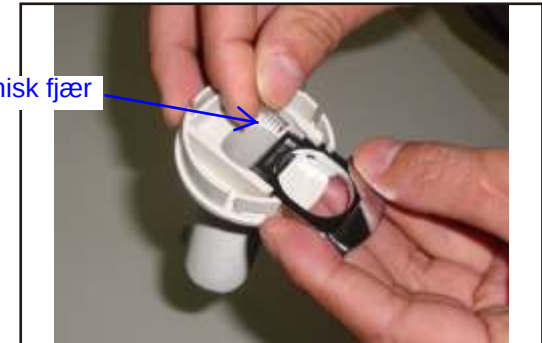

13. Plassér pollert belagt knapp inn i den andre hvite putelåsen, og monter på plass den mekaniske fjæren.

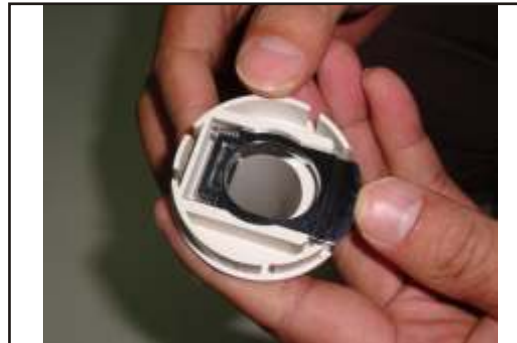

14. Press belagt knapp forsiktig inn, juster mekanisk fjær posisjon med knipetang for at belagt knapp skal bevege seg pent.



15. Plassér belagt dekselring som har kant, oppe på den andre hvite putelåsen.



16. Sjekk at delene er godt montert og at knappen kan presses inn/ut elegant. Rengjør belagte overflater.



17. Til komplett montering: Bemerkt at putelås med knapp må monteres på stanga med skråhakk, og juster knappen slik at den peker utover fra karet (180 grader fra skråtaggede stang)